

## φ1.2 Radius Reduction Plate ~ φ1.2RRP ~


材質：JIS2種純チタン

### φ1.2 RRP


φ1.2RRP ストレート型




φ1.2RRP H型

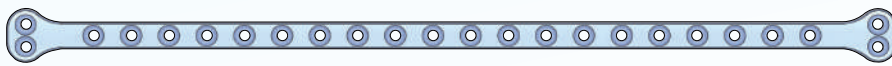

φ1.2RRP TH型

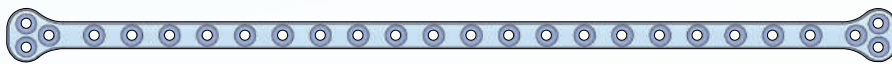

φ1.2RRP TO型

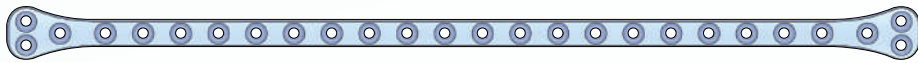

商品コード	商品名	穴数	全長	幅	厚み	穴径
RS12-20T	φ1.2 RRP ストレート型	20	100			
RH12-24T	φ1.2 RRP H型	24	118	3.5	1.2	1.4
RT12-26T	φ1.2 RRP TH型	26				
RO12-26T	φ1.2 RRP TO型	26	121			

φ1.2 横骨整復システム 医療機器製造販売承認番号：25 動薬第 3548 号

## Cortex Screw φ1.2

材質：チタン合金

### コーテックススクリューφ1.2

ドライバーはφ1.5RRPと共通  
ドリル CA-Vet φ 0.9 使用



商品コード	全長
CR12-05T	5
CR12-06T	6
CR12-07T	7
CR12-08T	8
CR12-09T	9
CR12-10T	10
CR12-12T	12


φ1.2 横骨整復システム  
医療機器製造販売承認番号 25 動薬第 3548 号

## Drill

材質：ステンレス

### ドリルCA-Vet

コントラアングルハンドピース専用ドリル

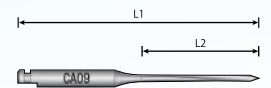

商品コード	サイズ	全長 L1	ドリル先 L2
30500000	φ 0.9	33.5	16
30500010	φ 1.1		
30500020	φ 1.5	43.5	25
30500030	φ 1.7		

製造販売元：株式会社デンテック 動物用一般医療機器

## φ1.2 RRP Starter Set

### φ1.2 RRPスターターセット / RRPS-020



商品コード	商品名	数量
RS12-20T	φ1.2 RRP ストレート型	1
RH12-24T	φ1.2 RRP H型	1
RT12-26T	φ1.2 RRP TH型	1
RO12-26T	φ1.2 RRP TO型	1
CR12-05T~12T	φ1.2コーテックススクリュー L5~12mm	各5
RRPT-016	φ1.2横骨整復パレット (W159.6×D127.5×H18.5)	1

## Tool

### 横骨整復ツール

φ1.5RRPと共通



商品コード	商品名
TLSD-01S	スクリュードライバー S φ1.2/φ1.5/φ2.0 (スリーブ付)
TLHQ-001	ハンドルクイック型
TLSF-001	スクリュー保持鉗子
TLTP-009	横骨整復ツールパレット (W158×D124×H26.5)

\* (単位：mm)

### 使用上の注意

- ・本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しないこと。本品のプレートは専用のスクリュー（コーテックススクリューφ1.2）を使用すること。
- ・異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しないこと。
- ・肥満体の患者には慎重に使用すること。（患者の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある）
- ・術後、完治するまでは外固定を併用すること。
- ・本製品を使用した患者には、注意深く術後管理を行なうこと。



### 販売元



株式会社プラトンジャパン  
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00~17:00迄  
TEL: 042-736-3903  
FAX: 042-735-2426  
E-mail: info@sopiatech.co.jp

### 代理店