


Positive Hi Wire

ポジティブ Hi ワイヤー：医療機器製造販売承認番号：26 動薬第 206 号

ポジティブ Hi ワイヤー

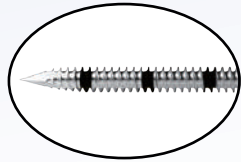

商品コード	商品名	骨ネジ径	骨ネジ長	シャフト径	全長
PHWR-012	ポジティブ Hi ワイヤー ø1.2mm	ø1.2	12	ø0.8	90
PHWR-015	ポジティブ Hi ワイヤー ø1.5mm	ø1.5	15	ø1.0	
PHWR-020	ポジティブ Hi ワイヤー ø2.0mm	ø2.0	20	ø1.2	110
PHWR-024	ポジティブ Hi ワイヤー ø2.4mm	ø2.4	24	ø1.5	


- ・商品発送時は、先端をシリコンチューブで保護しています。
- ・シリコンチューブは滅菌不可。
- ・スクリューを併用する際は、干渉しないように注意してください。

材質：チタン合金

Titanium Hi Wire

チタン Hi ワイヤー：医療機器製造販売承認番号：26 動薬第 1266 号

チタン Hi ワイヤー

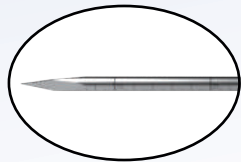

商品コード	商品名	直径	全長
THWR-08W	チタン Hi ワイヤー ø0.8mm	ø0.8	150
THWR-10W	チタン Hi ワイヤー ø1.0mm	ø1.0	
THWR-12W	チタン Hi ワイヤー ø1.2mm	ø1.2	
THWR-14W	チタン Hi ワイヤー ø1.4mm	ø1.4	
THWR-16W	チタン Hi ワイヤー ø1.6mm	ø1.6	
THWR-20W	チタン Hi ワイヤー ø2.0mm	ø2.0	
THWR-24W	チタン Hi ワイヤー ø2.4mm	ø2.4	
THWR-30W	チタン Hi ワイヤー ø3.0mm	ø3.0	

- ・表面を微小粗造構造化し、ワイヤー表面と血液の親和性を確保。
- ・商品発送時は、先端をシリコンチューブで保護しています。
- ・シリコンチューブは滅菌不可。
- ・スクリューを併用する際は、干渉しないように注意してください。

材質：チタン合金

Titanium Hi Surgical Line

チタン Hi サージカルライン：医療機器製造販売承認番号：26 動薬第 887 号

チタン Hi サージカルライン



商品コード	商品名	直径	全長
THSL-506	チタン Hi サージカルライン ø0.6mm	ø0.6	5 m
THSL-508	チタン Hi サージカルライン ø0.8mm	ø0.8	
THSL-510	チタン Hi サージカルライン ø1.0mm	ø1.0	

- ・ポビンはオートクレーブ滅菌可能。
- ・ステンレス製の類似医療機器使用時の 2 倍以上の本数、又は 2 倍以上の締結箇所にて固定を行ってください。

材質：JIS1 種 純チタン

* (単位: mm)

- 使用上の注意
- ・本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しないこと。
 - ・異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しないこと。
 - ・肥満体の小動物には慎重に使用すること。(小動物の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある)
 - ・体外で使用している場合は、MRI 検査を行わないでください。体内に留置した状態で MRI 撮影を行う際は、アーチファクトが発生する場合があります。
 - ・MRI 使用中は、小動物を観察し異常が見られた際は、MRI の使用を中止してください。
 - ・固定の際、骨質によっては、タッピングを併用すること。
 - ・術後、完治するまでは外固定を併用すること。
 - ・本製品を使用した小動物には、注意深く術後管理を行なうこと。



販売元



株式会社プラトンジャパン
〒195-0062 東京都町田市犬蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00~17:00迄
TEL: 042-736-3903
FAX: 042-735-2426
E-mail: info@sophiatech.co.jp

代理店