

φ 1.5 Radius Reduction System Line Up

φ1.5Radius Reduction Plate (φ1.5RRP)

材質：JIS2種純チタン

φ1.5 橈骨整復プレート

φ1.5RRP ストレート型




端幅
4.2mm

φ1.5RRP H型




7.6mm

φ1.5RRP TH型

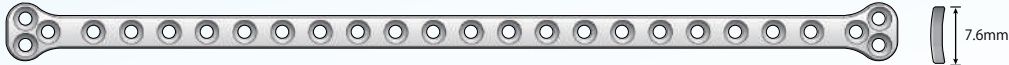

7.6mm

φ1.5RRP TO型

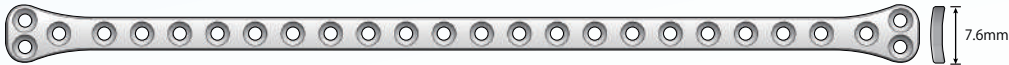

7.6mm

商品コード	商品名	穴数	全長	幅	厚み	穴径
RSPT-20T	φ1.5橈骨整復プレート ストレート型	20	100			
RHPT-24T	φ1.5橈骨整復プレート H型	24	118	4.2	1.5	1.8
RTPT-26T	φ1.5橈骨整復プレート TH型	26				
ROPT-26T	φ1.5橈骨整復プレート TO型	26	121			

* 補助プレートとして穴ピッチが等しいカントゥアリングサポートプレートが使用できます。* 原寸大

橈骨用チタンプレート 医療機器製造販売承認番号：23 動薬第 2634 号-1

Cortex Screw φ1.5

材質：チタン合金

コーテックススクリューφ1.5



商品コード	全長
CR15-04T	4
CR15-06T	6
CR15-07T	7
CR15-08T	8
CR15-09T	9
CR15-10T	10
CR15-12T	12
CR15-14T	14


ST 動物用チタンスクリュー 医療機器製造販売承認番号：27 動薬第 2965 号

Drill CA-Vet

材質：ステンレス

ドリルCA-Vet

コントラアングルハンドピース専用

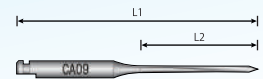

* 5本入/1Size

商品コード	サイズ	全長 L1	ドリル先 L2
30500000	φ 0.9	33.5	16
30500010	φ 1.1		
30500020	φ 1.5	43.5	25
30500030	φ 1.7		

販売元：デンテック 動物用一般医療機器


φ1.5 RRP Starter Set Line UP

φ1.5 橈骨整復スター セットラインナップ



RRPS-A17

φ1.5 橈骨整復スターセットA (パレット：RRPT-015)

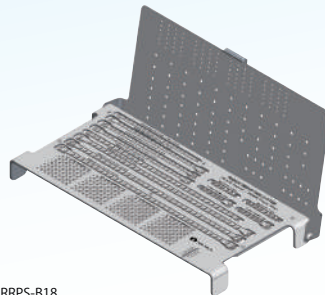

RRPS-B18


φ1.5 橈骨整復スターセットB (パレット：RSPT-013)

* 単体での販売可

商品コード	商品名	数量
RSRT-20T	φ1.5橈骨整復プレート ストレート型	1
RHPT-24T	φ1.5橈骨整復プレート H型	1
RTPT-26T	φ1.5橈骨整復プレート TH型	1
ROPT-26T	φ1.5橈骨整復プレート TO型	1
CR15-06T~14T	φ1.5コーテックススクリュー L6~14mm	各6
RRPT-015	橈骨整復パレット (W159.6×D127.5×H18.5)	1
RSPT-013	橈骨整復システムパレット (W265×D128×H27)	1

Tool Starter Set Line UP

ツールスターセットラインナップ

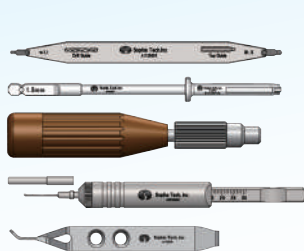

TLTS-019

橈骨整復ツールスターセット

* 単体での販売可

商品コード	商品名
TLDG-015	ドリル&タップガイド (φ1.5スクリュー用)
TLSD-015	スクリュードライバ S φ1.5/φ2.0 (スリーブ付)
TLHQ-001	ハンドルクイック型
TLDP-015	デプスゲージ S φ1.5 ~ 2.4
TLSF-001	スクリュー保持鉗子
TLTP-009	橈骨整復ツールパレット (W158×D124×H26.5)

使用上の注意

- ・本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しないこと。本製品は専用のスクリュー (ST 動物用チタンスクリュー) を使用すること。
- ・異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しないこと。
- ・肥満体の患者には慎重に使用すること。(患者の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある)
- ・スクリュー固定の際、骨質によっては、タッピングを併用すること。
- ・術後、完治するまでは外固定を併用すること。
- ・本製品を使用した患者には、注意深く術後管理を行なうこと。



販売元



株式会社 プラトンジャパン
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00~17:00迄
TEL: 042-736-3903
FAX: 042-735-2426
E-mail: info@sophiatech.co.jp

代理店